





新型コロナウイルス(COVID-19) ふき取りマニュアル Ver1.0.1

本検査キットは環境中からの新型コロナウイルス検出用であり、生体試料には対応しておりません。

<p>(1)</p>	<p>検査キットの中身を確認！ 変質の可能性がありますので、直射日光・高温下での保管は避けてください。</p> <p>○内容物</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スワブ×検体分 ・チャック袋 ・ねじ口チューブ（青蓋） ・検体シール ・検査依頼書（コピー） ・使い捨て手袋 ・宅配伝票(宛先記入済み) ・ふき取りマニュアル（本書） 							
<p>(2)</p>	<p>付属のシールに検体名を記入 検体情報を依頼書にも記入 検体番号（右図 No.欄）は依頼書と同じ番号を記入願います。</p>	<table border="1" data-bbox="745 741 1282 977"> <tr> <td data-bbox="745 741 1100 824">日時</td> <td data-bbox="1100 741 1282 824">No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="745 824 1282 901">場所</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="745 901 1282 977">対象 有効期限等が記入済み</td> </tr> </table> <p>日時、検体番号、検体名の記入をお願いします。</p>	日時	No.	場所		対象 有効期限等が記入済み	
日時	No.							
場所								
対象 有効期限等が記入済み								
<p>(3)</p>	<p>キャップをあけて中の液体(生理食塩水)を捨てる。ふきとりたい場所の付近にきたら、内壁面で液を切る。(生理食塩水なので人体に害はありませんが、乾燥すると結晶化する場合があります。)</p>	<p>スワブの使用写真</p> 						
<p>(4)</p>	<p>ふき取りたい場所を確認し、スワブの綿球全体を使ってまんべんなくふき取ってください。</p> <p><よりよいふき取りの方法> ふき取り対象区画(30cm×30cm程度)を設定し、等間隔に縦10回、横10回、斜め5回、逆斜め5回をふき取ってください。 必要に応じて使い捨て手袋をご使用ください。</p>	<p>ふき取り例</p> 						

(5)	<p>ふき取ったスワブを容器に戻してしっかりキャップを閉める。 その後、サンプル名を記入したシールを貼りつけ、ねじ口チューブに入れ しっかり蓋を閉める。</p>	
(6)	<p>ねじ口チューブごと検体送付用チャック袋に入れて口を閉じます・</p>	
(7)	<p>検査依頼書のコピーに採取日時を記入してください。 検体名などに変更がある場合は変更をお願いいたします。</p>	
(8)	<p>ふき取り後は、速やかに、必ず検査依頼書を同封して冷蔵便で当社宛てに発送してください。 宅配業者の指定はございませんがよろしければ同封の送り状をご利用ください。送料はお客様のご負担をお願いいたします。 ※ふき取り後48時間以内に当社に到着するよう手配をお願いいたします。土日祝は受け取りできませんので、平日着でお願いいたします。</p>	

本マニュアルは今後変更される可能性があります。